



Sem limites. Sem comprometermos. Audição até debaixo da água.

Uma grande parte da diversão no verão gira em torno das atividades aquáticas. Seja nadando na piscina, fazendo castelos na areia, andando de caiaque nos lagos ou simplesmente brincando no mar, os usuários da AB tem uma experiência auditiva sem limites e sem comprometermos auditivos, podendo até "ouvir" embaixo da água. A AB oferece o acessório impermeável AquaCase™ para o uso com o Naída CI Q70, e o único microfone aquático da indústria, o AquaMic™, para o uso também com o processador Neptune™.



Os usuários do processador Neptune já usufruíam dessa liberdade, já que o próprio processador de fala é totalmente a prova de água, e o microfone AquaMic, já fornecia excelente performance auditiva dentro e fora de água, sem comprometimento à qualidade do som.

Diferente dos outros acessórios aquáticos do mercado, o AquaCase tem uso ilimitado, além de fornecer uma forte retenção e proteção contra impactos. O AquaCase permite que os usuários usem seus processadores Naída CI em qualquer tipo de água, na lama, em ambientes sujos e empoeirados, enfim, aonde a aventura puder levá-los!

Dicas de programação:

- Ao usar o AquaCase com o NaídaCI, lembre de selecionar o microfone da antena como recurso de entrada!
- Faça um programa específico para o uso com o AquaCase e sugestão: nunca deixe esse programa no P1 do processador.
- Lembre-se que sempre que o paciente retira e coloca a bateria volta para o P1, portanto esse deve ser o seu programa de cotidiano e não um programa específico.

Depoimentos




"Nadar ficou muito mais gostoso agora que eu posso escutar dentro da água com o novo AquaCase."

Adit, usuário AB

"Participar de um triathlon demanda o melhor de nós em três disciplinas: natação, bicicleta e corrida. Meu processador Neptune me permite não só escutar a competição ao meu redor, como também a torcida gritando e dizendo palavras de encorajamento."

Sam, usuário AB

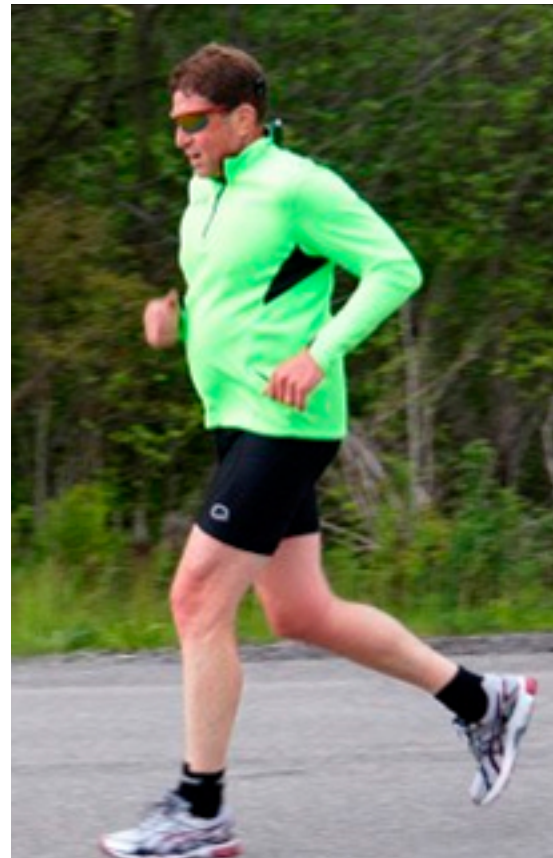

Nosso comprometimento

A Advanced Bionics se está empenhada em apoiar os seus esforços para atingir os melhores resultados auditivos para seus pacientes. Lembre-se de usar os diversos recursos que estão disponíveis para você e seus pacientes. Estamos aqui para ajudá-lo a cumprir sua missão.