



美人鱼声音处理器 LED快速参考卡

美人鱼声音处理器程序设置表

程序	用途描述	LED	遥感线圈
1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

028-M149-70

©2013 Advanced Bionics AG及其关联公司。保留所有权利。

AdvancedBionics.com



三色LED指示灯
(绿色、橙色、红色)

音量按钮

程序按钮



姓名:

□  右耳

□  左耳

颜色	状态	LED打开?	说明
橙色	启动时闪烁	是 电池指示灯只有在搭配可充电的PowerCel电池和PowerPak 7号电池盒时才可用。使用锌空气电池时, 电池寿命指示灯无效。	<ul style="list-style-type: none">快速闪烁4次表示电池已充满快速闪烁2-3次表示电池电量足以启动系统快速闪烁1次表示电池电量即将耗尽不闪烁表示电池电量已耗尽。请更换已充电电池或新电池
	常亮*	如果由听力医生激活	电池电量即将耗尽
	每三秒闪烁两次	如果由听力医生激活	电池电量已耗尽, 无法支持刺激
	熄灭	是	进入待机模式
红色	每秒闪烁一次	如果由听力医生激活	植入体通讯中断
	快速闪烁 (每秒不止一次)	是	IntelliLink™ 连接至错误的植入体
	常亮	是	声音处理器错误状态。完全取出并更换电池以重置处理器。
绿色	对高分贝声音作出闪烁回应	如果由听力医生激活	声音处理器和麦克风正在对声音作出回应
	电池启动后状态和程序更改时闪烁*	是	<ul style="list-style-type: none">闪烁1次表示第一档程序闪烁2次表示第二档程序闪烁3次表示第三档程序闪烁4次表示第四档程序闪烁5次表示第五档程序

*这些LED指示灯如果由听力医生激活, 会有内部警报。

美人鱼声音处理器