

Consejos para usar mascarillas con implantes cocleares

La mejor manera de mantener seguros los implantes cocleares cuando se usa una mascarilla es colocarse la mascarilla primero y los implantes cocleares en segundo lugar. Asegúrese de quitar el IC primero y la mascarilla en segundo lugar para evitar que el IC se caiga.



Tenga cuidado al quitar o ajustar la máscara para evitar que los implantes cocleares se caigan.

Mascarillas con lazadas

Asegúrese de atarla alto en la cabeza y bajo en el cuello. Al quitar la mascarilla, desate la parte inferior primero y luego la superior para evitar hacer caer los implantes cocleares de la cabeza.



Mascarillas con bandas extensoras

Considere un extensor como se muestra en la imagen. Los extensores conectan las gomas de la mascarilla para evitar el contacto con las orejas. Se puede hacer con un clip, cordón o cinta



Tenga cuidado al quitar o ajustar la máscara para evitar que los implantes cocleares se caigan.



Mascarillas con gorras

También puede considerar coser dos botones en una gorra para ayudar a que los implantes cocleares se mantengan seguros en las orejas.

Para quitar la mascarilla, primero desabroche de un lado lentamente evitando enganchar el procesador de sonido. Repita el mismo proceso en el otro lado.



Tenga cuidado al quitar o ajustar la máscara para evitar que los implantes cocleares se caigan.

Se puede usar una diadema o una cinta para asegurar su mascarilla.

Los botones se pueden coser o pegar a ambos lados de una cinta o diadema de tela. Simplemente enganche las gomas sobre los botones. Para quitar, retire un lado y luego el otro, lentamente.

Cuando use una diadema dura, pegue los botones en ambos extremos de la diadema para ayudar a mantener la mascarilla en su lugar.



Tenga cuidado al quitar o ajustar la máscara para evitar que los implantes cocleares se caigan.