

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に関する機器の消毒についてのお知らせ

アドバンスト・バイオニクス社製品装用者の皆様へ

アドバンスト・バイオニクス社は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大抑止に向けて責任を果たすとともに、このような困難な時期においても、クオリティの高い聞こえのケアを優先して提供することをお約束します。この未曾有の時代に、皆様の健康と安全は、私たちの優先事項です。そのための取り組みの一環として、以下のおすすめのヒアリングケアをご覧ください。

お使いの機器を感染から保護する最善の方法は、WHO（世界保健機関）のガイドランが推奨しているように手洗い、社会的距離感などの予防が最も効果的です。

お使いの機器が汚染されているのではないかと心配な場合は、米国環境保護庁（EPA）が消毒に推奨される物質のリスト*を用意しています。これらの物質は、お使いの機器での使用について検証されていないことにご注意ください。

サウンドプロセッサ等に使用されている材料は、生体適合性と性能を考慮して慎重に選択されています。消毒を行った場合は、この機器が故障してしまう可能性もあります。

しかしながら以下のような対策を検討することができます。

- アルコールクリナー（60～70%溶液のエタノールやイソプロパノール）
- クリーナーの説明書で推奨されている方法で使用してください。
- サウンドプロセッサ等の機器を液体に浸さないでください。
- 広い面だけに使用してください。
- マイクロホン、切片近くのプラスチック部分、バッテリー接続部には使用しないで下さい。
- 使用する前に機器を完全に乾燥させて下さい。

繰り返しになりますが、感染予防は皆様と皆様の機器を守るための最も効果的な方法です。AB社では、お客様が機器を消毒したとしても破損しないことを保証することはできません。

このような困難な時期に、皆様の安全と健康を願っております。

*消毒物質のEPAリスト（英語のみ）

<https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2>

027-N058-17 RevA

©2020 Advanced Bionics AG および関連会社。無断複写・転載を禁じます。