

## Onderhoud van de Naída CI Q90-spraakprocessor Gebruik Cedis e100 DS droogdoos

Er wordt een droogstelsel meegeleverd bij de Naída CI Q90. Dit droogstelsel is ontworpen om vocht uit de apparatuur te halen en is bedoeld voor dagelijks gebruik van de Naída CI Q90. Advanced Bionics adviseert zowel de processor als de losse accu's regelmatig te drogen.

1. Plug de stroomkabel in de droogdoos en open de klep.
2. Verwijder de batterij en kabel van de processor en leg deze met de zendspoel in de droogdoos.
3. Afhankelijke van de hoeveelheid vocht op de processor kies:
  - a. Gewone droogcyclus (1,5 uur droogtijd). Druk één keer op de knop. Een **rood licht** is zichtbaar.
  - b. Intensieve droogcyclus (3 uur droogtijd). Druk twee keer op de knop. Een **blauw licht** is zichtbaar.



4. Wanneer de droogcyclus is voltooid, gaat het lampje uit. Open het deksel en verwijder de processor, batterij, kabel en zendspoel.



5. Vervang de droger als het licht afwisselend rood en blauw knippert.



Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Engelstalige instructievideo:  
[www.youtube.com/watch?v=Kf4RuZEsRSI](https://www.youtube.com/watch?v=Kf4RuZEsRSI)

