

Guide d'utilisation

Boîte déssicante Cedis e100 DS



1. Brancher le câble d'alimentation à la boîte déssicante et ouvrir le couvercle.

2. Retirer la batterie du processeur et placer le reste de l'équipement (processeur, câble, antenne) dans la boîte.

Les batteries peuvent occasionnellement être placées dans le Cedis, notamment après une exposition de votre équipement à la pluie, la sueur ou à de l'humidité excessive.

3. Selon le degré d'humidité du processeur, il est possible de choisir entre deux cycles (A.) :

- Cycle de séchage court de 1h30. Appuyer une fois sur le bouton, un **témoin rouge** s'affiche.
- Cycle de séchage recommandé de 3h. Appuyer deux fois sur le bouton, un **témoin bleu** s'affiche.

Appuyer trois fois sur le bouton pour éteindre le système.


4. Une fois le cycle de séchage terminé, le témoin lumineux s'éteint (B.). L'équipement peut alors être récupéré.




A.



B.

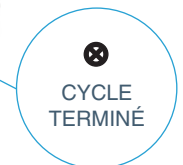

C.

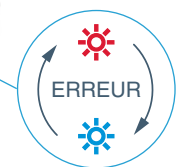

Si le témoin lumineux clignote alternativement en rouge et en bleu (C.), contacter le Service Clients d'Advanced Bionics.



Advanced Bionics Sàrl - Tel : +33 (0)4 72 14 54 60
Email : info.france@advancedbionics.com
Du lundi au vendredi : 9h à 12h30 | 13h30 à 17h

Notre boutique en ligne : advanced-bionics.fr.
Nos outils de rééducation en ligne : abrehabportal.com.
Notre site internet : AdvancedBionics.com.