


Guía de conexión Bluetooth

Conecte sus procesadores de sonido Marvel CI a sus dispositivos Bluetooth® para transmitir audio y hacer llamadas telefónicas con manos libres


EMPAREJAMIENTO CON DISPOSITIVO IOS DE APPLE:

1. Vaya a la pantalla de inicio y pulse el icono de *Ajustes*.
2. En el menú *Ajustes*, pulse el icono de *Bluetooth*.
3. Pulse el control deslizante que está cerca de *Bluetooth* para activarlo.
4. Conecte la batería M a su Marvel CI para comenzar la ventana de emparejamiento de 3 minutos (su dispositivo intentará conectarse).
5. Tras varios segundos, el nombre personalizado de su dispositivo Marvel CI aparecerá en la pantalla del dispositivo iOS® bajo "Otros dispositivos". Pulse sobre él para seleccionarlo.
6. Podrá aparecer el mensaje: *Solicitud de emparejamiento Bluetooth*. Haga clic en *Emparejar*.
7. Escuchará un "bip" en el dispositivo Marvel CI que se ha emparejado.
8. Su dispositivo iOS está ahora conectado a su Marvel CI.

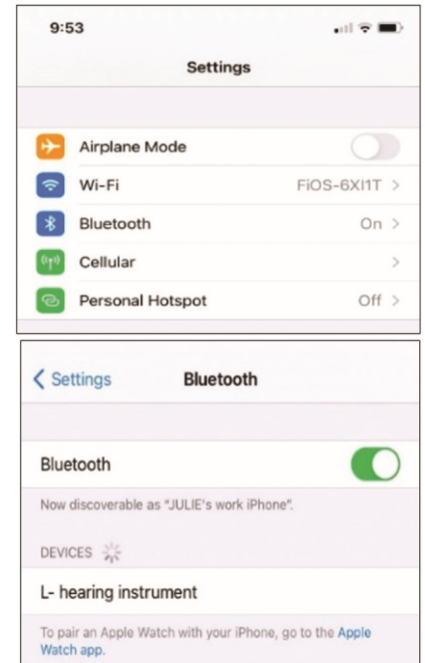

EMPAREJAMIENTO CON DISPOSITIVO ANDROID:

1. Vaya a los *Ajustes* del dispositivo y pulse en *Conexiones*.
2. En el menú de *Conexiones*, pulse el control deslizante para activar el Bluetooth.
3. Conecte la batería M a su Marvel CI para comenzar la ventana de emparejamiento de 3 minutos (su dispositivo intentará conectarse).
4. Una vez que el Bluetooth del dispositivo Android™ está activado, automáticamente buscará los dispositivos disponibles cercanos.
5. En el teléfono Android, verá el mensaje: *Dispositivos disponibles*. Si no aparecen dispositivos, retire la batería del Marvel CI y vuelva a colocarla y pulse *Buscar* de nuevo.
6. El nombre de su Marvel CI aparecerá. Pulse sobre él para seleccionarlo.
7. Podrá aparecer un mensaje en su dispositivo Android para que confirme la solicitud de emparejamiento.
8. Escuchará un "bip" en el dispositivo Marvel CI que se ha emparejado.
9. Su dispositivo Android está ahora conectado a su Marvel CI.

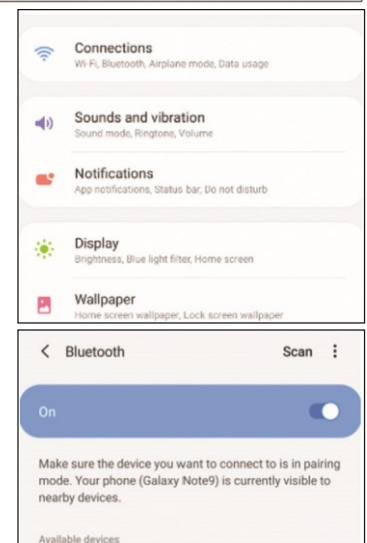

EMPAREJAMIENTO CON OTROS DISPOSITIVOS CON BLUETOOTH (P.E. ORDENADORES, TV, TABLET)


1. Vaya al menú *Ajustes* de Bluetooth de su dispositivo.
2. Conecte la batería M a su dispositivo Marvel para comenzar la ventana de emparejamiento de 3 minutos.
3. Añada el dispositivo Bluetooth y seleccione Marvel CI para emparejar y conectar.
4. Si se le solicita, el código de emparejamiento es 0000.

Si está usando dos dispositivos (dos Marvel CI o un Marvel CI y un audífono Naída Link M de Phonak), solo el lado designado por su audiólogo/programador como su "lado Bluetooth" se mostrará en el menú Bluetooth de su dispositivo.

Consejos rápidos del Bluetooth de Marvel CI

¿QUÉ ES BLUETOOTH?

Bluetooth es una tecnología inalámbrica que permite a dos dispositivos diferentes conectarse entre sí. Es un protocolo universal, que habilita las llamadas telefónicas y la transmisión para todos los dispositivos con Bluetooth de cualquier marca.

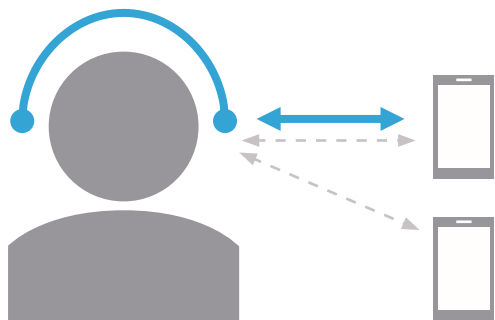

Emparejar hasta dos dispositivos a la vez

Emparejar es el proceso de establecer un enlace entre dos dispositivos, permitiéndoles comunicarse entre sí.

Conectar un dispositivo cada vez

La conectividad ocurre cuando los dos dispositivos están intercambiando información activamente como al reproducir música.

Si lleva dos Marvel CI o un Marvel CI y un audífono Naída Link M, la reproducción de multimedia y las llamadas telefónicas siempre se escucharán en ambos lados

REALIZAR UNA LLAMADA TELEFÓNICA

1. Si no ha emparejado el dispositivo, siga las instrucciones de la página 1 para emparejar el teléfono con Marvel CI.
2. Conecte su teléfono a Marvel CI.
 - Un dispositivo emparejado estará conectado.
 - Si ya emparejó el teléfono pero conectó también otro dispositivo (p.e. Tablet) retire la batería M y vuelva a colocarla o deshabilite el Bluetooth del otro dispositivo que no quiere utilizar para la llamada.
3. Está listo para realizar la llamada.

¿Qué es Captación de Voz Propia?

La captación de voz propia permite las llamadas manos libres utilizando los micrófonos de Marvel CI, en lugar de los micrófonos del teléfono, para captar su propia voz.

RECIBIR UNA LLAMADA TELEFÓNICA

1. Si un teléfono está emparejado y conectado, el sonido de la llamada y el audio sonará en su Marvel CI. Si utiliza dos Marvel CI o un Marvel CI y un audífono Naída Link M de Phonak, escuchará el sonido de llamada y la llamada telefónica por ambos oídos.
2. Una pulsación corta sobre el botón del procesador de sonido descolgará la llamada entrante. Podrá utilizar el botón multifunción para ajustar el volumen del audio.
3. Si el teléfono está emparejado pero no conectado, no escuchará el tono de llamada en su Marvel CI.

CAPTACIÓN DE VOZ PROPIA

La captación de voz propia es el ajuste por defecto cuando su teléfono está conectado con Marvel CI. Si no desea que el sonido se transmita directamente al procesador, desconecte el Bluetooth en el menú de teléfono.

AJUSTE DE VOLUMEN EN UNA LLAMADA TELEFÓNICA POR BLUETOOTH

Puede cambiar el volumen del teléfono con los botones laterales de su teléfono o con el botón del procesador Marvel CI.

La app AB Remote no controla el volumen durante las llamadas telefónicas.

ESCUCHAR MÚSICA O VIDEOS

1. Si no ha emparejado el dispositivo, siga las instrucciones de la página 1 para emparejar el teléfono con Marvel CI
2. Conecte su teléfono a Marvel CI.
 - Un nuevo dispositivo emparejado estará conectado.
 - Si ya emparejó el teléfono pero conectó también otro dispositivo (p.e. Tablet) retire la batería M y vuelva a colocarla.
3. Puede incrementar el volumen en el Marvel CI o en el dispositivo de audio.
4. Puede usar la app para controlar el audio. Vea la sección "Utilizando la app"

UTILIZAR SKYPE, FACETIME, Y WHATSAPP CON MARVEL CI

Marvel CI es compatible con Skype, FaceTime y WhatsApp para llamadas de audio y video.

La llamada se escuchará en Marvel CI como las típicas llamadas telefónicas. Si usa aplicaciones de videollamadas populares como Skype y Facetime en una tableta u ordenador, Marvel CI debe estar emparejado y conectado a ese dispositivo.

1. Si no ha emparejado el dispositivo, siga las instrucciones de la página 1 para emparejar el teléfono con Marvel CI
2. Conecte su teléfono a Marvel CI.

- Un dispositivo emparejado estará conectado.
- Si ya emparejó el teléfono pero conectó también otro dispositivo (p.e. Tablet) retire la batería M y vuelva a colocarla.

Cuando su teléfono está conectado a Marvel CI, la captación de voz propia está activada. Si no desea que el sonido se transmita directamente a su procesador y utilice el micrófono de Marvel, desconecte su teléfono en el menú de Bluetooth.

BLUETOOTH VS. BLUETOOTH LE (APP AB REMOTE)

La app AB Remote y Marvel CI aparecen por separado en el menú Bluetooth de su dispositivo.


La conexión de la app aparecerá como "LE_". Esto se debe a que la app usa Bluetooth de baja energía (Low Energy).

Si está escuchando con dos Marvel CI o un Marvel CI y un audífono Naída Link M, solo un Marvel CI se conectará con el Bluetooth, pero ambos oídos se conectarán con la app (LE_). Esto sucede porque la app controla ambos dispositivos a la vez.

Es recomendable emparejar el Marvel CI al teléfono para realizar llamadas antes de emparejar la app.

Escuchar con dos oídos

Su profesional de salud auditiva elegirá uno de sus Marvel CI para que se conecte por Bluetooth. Podrá escuchar el sonido por ambos oídos. Sus dos dispositivos Marvel CI están configurados como un único sistema. El segundo procesador no podrá reproducir desde otro dispositivo al mismo tiempo.

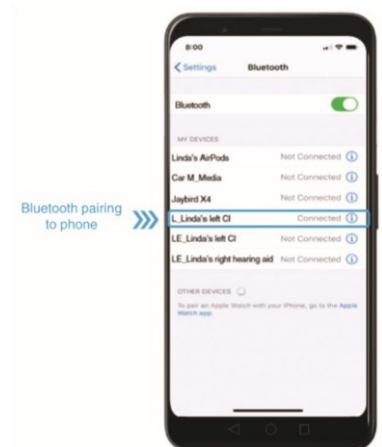

Bluetooth Device (Bluetooth Clásico) AB

- Transmisión de música y medios.
- Transmisión de llamadas telefónicas.
- Transmisión de Skype, WhatsApp, o FaceTime conversations.

Remote App (Bluetooth LE)

- Ajuste de volume y balance.
- Cambio de programas.
- Cambio de niveles progresivos.
- Realizar comprobación del dispositivo.
- Comprobar el nivel de batería y uso.

Solución de problemas de conectividad Bluetooth

COMPRUEBE ESTO PRIMERO

- Asegúrese de que sus dispositivos estén cargados. Algunos dispositivos Bluetooth pueden cambiar automáticamente la configuración de transmisión cuando están en modo de bajo consumo.
- Asegúrese de que su teléfono esté dentro del alcance. Si estuvo fuera del alcance (10 m) durante un período de tiempo largo, Marvel CI puede tardar hasta dos minutos en conectarse nuevamente. Es posible que deba desemparejar y volver a emparejar (siga las instrucciones para emparejar en la página 1).

EL AUDIO BLUETOOTH NO PARECE REPRODUCIRSE

1. Compruebe que el Bluetooth está activado en su dispositivo en [Ajustes > Bluetooth](#)
2. Asegúrese de que el dispositivo correcto está conectado a su Marvel CI.
3. Compruebe que el volumen del audio a reproducir no está bajado por completo.
4. Desempareje y vuelva a emparejar su Marvel CI.

MALA CALIDAD DE SONIDO DURANTE LAS LLAMADAS TELEFÓNICAS

1. Desempareje y vuelva a emparejar sus dispositivos Marvel CI y Bluetooth.
2. Reinicie su Marvel CI y su teléfono.
3. El Bluetooth adaptativo es un ajuste por defecto que puede afectar a la calidad del sonido en algunos modelos de teléfono y sistemas operativos. Para deshabilitar el Bluetooth Adaptativo utilizando la app, pulse en el icono de ajustes (esquina superior derecha), seleccione [Mis Dispositivos > Bluetooth Adaptativo > Apagar](#).

EL BLUETOOTH SE DESCONECTA

1. Si está usando la app AB Remote, desempareje y vuelva a emparejar. Se recomienda emparejar el dispositivo Bluetooth primero antes de emparejar la app AB Remote.
2. Desempareje y vuelva a emparejar su Marvel CI y el dispositivo Bluetooth.

DESACTIVAR SONIDOS TÁCTILES Y NOTIFICACIONES

- En dispositivos iOS, vaya a [Ajustes > Sonidos y vibraciones >](#) Desactive la [Respuesta de teclado y Sonido al bloquear](#).
- En dispositivos Android, vaya a [Ajustes > Sonidos y vibraciones > Sonido del Sistema / Control vibración >](#) encienda / apague los ajustes que desee cambiar.

La denominación Facebook y sus logotipos son marcas registradas de Facebook, Inc. WhatsApp y sus logotipos son marcas registradas de Whatsapp, Inc. La marca denominativa Bluetooth® y los logotipos son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Android™ es una marca comercial registrada propiedad de Google, Inc.; iOS®, iPhone®, and Apple® son marcas comerciales registradas propiedad de Apple, Inc.